

A modern, white hair removal machine with a large screen and a handpiece. The machine is sleek and futuristic, with a large, rectangular screen on top. A handpiece is attached to the side, and there are various buttons and controls on the front panel. The machine is set against a light background with a teal horizontal band across the middle.

The world's best hair removal machine

dimo Co., Ltd.

DIMOCUBE

弊社の強みは購入後のサポート

SNSの伸ばし方やマーケティングのノウハウを徹底的にコンサル致します

マシンを購入してからがビジネスのスタートになります。
多くのメーカーはマシンを販売すればそれで終了。
全くサポートをしてくれない。ということも少なくありません。
弊社は購入後からお客様との関わりがスタートだと思っています。
必ず売り上げに貢献致します。これが弊社の強みです。

多機能搭載

DIMO CUBEがあればエステサロンを開業できる

5つの機能と5枚のフィルター

- IPL(髭、VIO、脇)
- SHR(広い範囲の薄い毛)
- E-light(美肌効果)
- KPL(高速連射機能)
- RF(脂肪溶解)

【フィルター標準5枚】

- 430nm: ニキビの改善
- 530nm: シワ、赤ら顔、エイジングケア、バストアップ
- 590nm: シワ、赤ら顔、エイジングケア、シミ改善肝斑)
- 640nm: 脱毛 色の濃い人 日本人向け
- 690nm: 脱毛 色白の人



【オプション】

- 480nm波長: バストアップ
- 750nm波長: 脱毛 細かい毛



IPLの理論について

メラニン色素に対して作用するもので、**毛根(毛乳頭)に直接熱**を与えます。黒々とした毛ほど反応が出やすいですが、産毛のような薄い毛には脱毛効果が薄くなる可能性があります。比較的早く効果を時間できる脱毛方式で照射してから 1~2週間ほどの期間で、毛がポロポロと抜け落ちます。

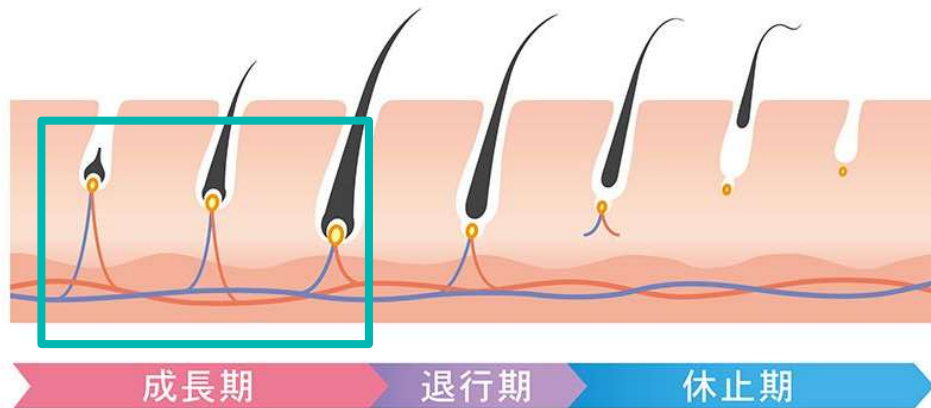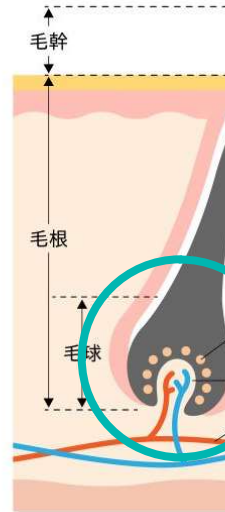

毛周期

効果的な部位

脇やヒゲ、VIOなど黒々とした濃い毛に適しています。

期間の目安

2週間~2か月の頻度で通うことが可能(個人差があります)



オススメの方

太くて濃い毛、剛毛の脱毛をしたい方・効果を早く実感したい方・あるなら我慢できる方

SHRの理論について

SHR脱毛のターゲットは**バルジ領域**という部分です。バルジ領域には、「色素幹細胞」と「毛包幹細胞」と2つの幹細胞が存在しており毛の生成において重要な細胞を作り出す働きをしています。

毛が生えるように指令をだす部分にダメージを与えていき、バルジ領域の活動が弱まると毛を作るために必要な細胞が作られなくなり、毛が生えてこなくなります

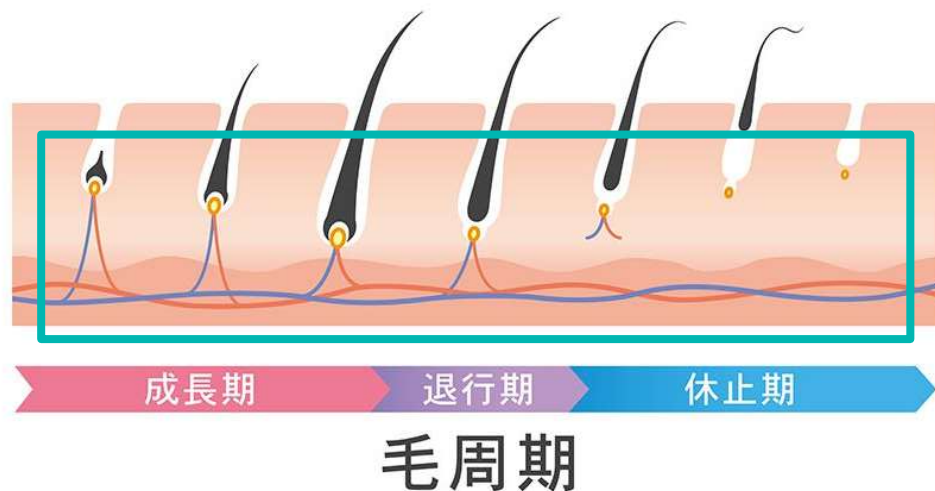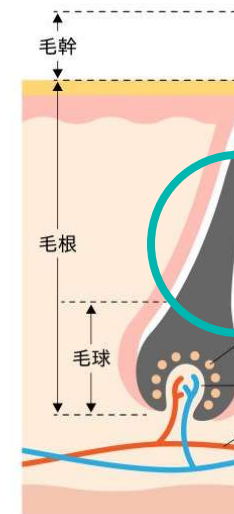

効果的な部位

どの部位でも効果があります。産毛が多い二の腕・背中・顔も OK

期間の目安


2週間～1か月の頻度で通うことが可能 (個人差があります)

オススメの方

- ・痛みに弱い方
- ・産毛・ほくろの毛も脱毛したい方
- ・敏感肌で肌が荒れがちの方

E-lightの理論について

Eライト(シミ取りレーザー治療)は、**IPLとRF(高周波)を同時に照射**し、肌にダメージを与えることなく肌の奥深くまでエネルギーを浸透させることで、しみやそばかす、赤ら顔が改善され、理想的な美肌効果をもたらします。**IPL**が表皮のメラニン色素に作用して、しみ・くすみを取り、赤ら顔、血管拡張症の血管にダメージを与え、**RF**は真皮の繊維芽細胞を刺激してコラーゲン・エラスチン・ヒアルロン酸などを増生させて、毛穴を引き締め、張りのあるお肌を作ります。従来の光治療と同様に痛みも少なく、ダウンタイムのない治療なので施術直後より効果が実感できお化粧してお帰り頂けます。3週間毎の治療がお勧めです。

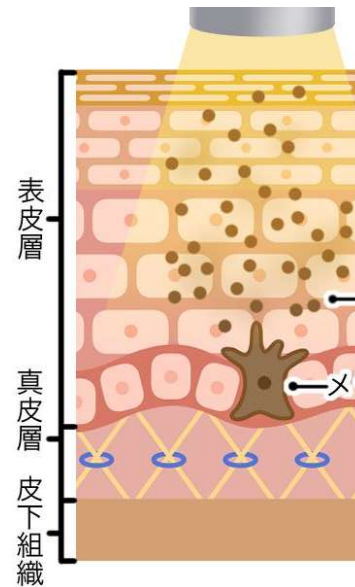

KPLの理論について

IPLより進化した最新の光脱毛システムを採用しており、痛みもほとんどなく安全です。SHR脱毛は1秒間に10連射できるのに対し、**KPL脱毛は1秒間に最大15連射**での照射が可能なので、全身脱毛で取り入れられることが多い方式です。また出力が可能なので、重ね打ちが不要となっています。KPL脱毛はSHR脱毛の照射を上げ、より短期間での脱毛が可能となった最先端脱毛方式です。

効果的な部位


どの部位でも効果があります。産毛が多い二の腕・背中・顔も OK

期間の目安

2週間～1か月の頻度で通うことが可能 (個人差があります)

オススメの方

- ・痛みに弱い方
- ・産毛・ほくろの毛も脱毛したい方
- ・敏感肌で肌が荒れがちの方

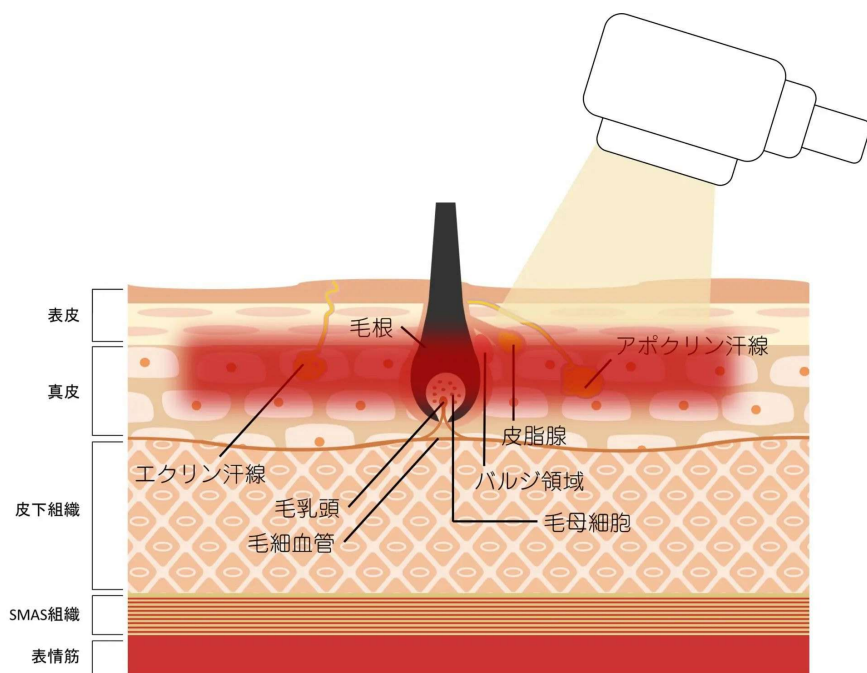

RFの理論について

光(赤外線、可視光線、紫外線)やTVの電波は「電磁波」の一種ですが、ラジオ波もこの電磁波のひとつです。RFとは、radio frequency(ラジオフリースクエンス)の略で、「ラジオ波」「高周波」と呼ばれることもありますが、波数30~300MHz(波長100km~1m)の電磁波のことを、総称して「ラジオ波」と呼びます。一概に「ラジオ波」と呼ばれるものでも、周波数や出力によってその効果は様々です。ラジオ波は電磁波を利用して脂肪を温める脂肪燃焼効果や代謝アップ効果が期待できます。

0.3~1MHz程度の低い周波数の電磁波では、ジュール熱が発生します。多くのラジオ波(RF)機器は、物質の内部に電気が流れることで発生する「ジュール熱」によって発熱する仕組みを利用しています。



User's manual

取り扱い 説明書

ご使用前に

はじめに
安全のご注意
ご使用の前に
製品仕様
梱包の確認
照射する周期について
脱毛前に必ず行ってください
各部の名前
設置する際のお願い
使用可能方式の解説

準備・接続

ハンドピースの接続
フットペダル
本体の給水方法
本体の排水方法
ブレーカーの準備
電源を点ける

使い方

モニタ操作 (SHR方式)
モニタ操作 (IPL方式)
モニタ操作 (E-light方式)
モニタ操作 (RF方式)
ハンドピースの使用方式 (ハンドピースA)
ハンドピースの使用方式 (ハンドピースB)
ハンドピースフィルターの使用方式
カートリッジ使用用途
フットペダルの使用方式

終了方法

モニタ操作
拭き掃除
収納について

必要な時に

よくあるお問い合わせ
故障かな
お問い合わせ窓口
保証について
保証書

■はじめに




この度は、弊社脱毛器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当脱毛器は顔や体のムダ毛のお手入れができます。

- ・正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ・お読みになった後は、いつでも確認できるような場所で保管ください。
- ・本製品の修理を行う上で、この取扱説明書を必ず添付してください。

■安全上のご注意




- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・故障等がありましたら、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに記した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱をすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

■注意区分について

-  **危険** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じると想定される内容です。
-  **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
-  **注意** 誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

■図形について

-  してはいけないことを示します。
-  遵守しなければなりません。
-  注意しなければなりません。

ご使用前に

各部の名称





禁止

- 施術が出来ない方
 - ・体調がすぐれない方
 - ・妊娠中・授乳中の方
 - ・皮膚疾患がある方
 - ・お肌に炎症・腫れ・赤みがある方
 - ・心疾患や頻脈症のある方
 - ・当日飲酒をされている方
 - ・悪性腫瘍のある方(既往歴の場合も含む)
 - ・感染症を発病している方
 - ・血液凝固傷害、抗凝血療法中の方、毛細血管拡張が起きやすい方
 - ・知覚や聴覚に障害のある方
 - ・ペースメーカーや心室除細動器をご使用の方
 - ・その他心身にトラブルをお持ちの方
- 施術が出来ない皮膚疾患
 - ・皮膚がん、悪性黒色腫(メラノーマ)
 - ・ヘルペス
 - ・イボ
 - ・タムシ、白癬
 - ・とびひ
 - ・せつ(膿腫)
 - ・その他皮膚疾患をお持ちの方
- 施術が出来ない内科疾患
 - ・不整脈や深刻な心疾患
 - ・糖尿病や自己免疫疾患
 - ・てんかんや気管支ぜんそく
 - ・その他内科疾患をお持ちの方
- 施術が出来ない体質
 - ・アトピー性皮膚炎や乾癬等の皮膚慢性疾患
 - ・アレルギー体質(光アレルギー、光線過敏症など)
 - ・ケロイド体質
 - ・その他特異な体質をお持ちの方



遵守

- コンセントから電源プラグを抜くときは、コードを持たずに電源を引抜き、感電・ショート・発火原因になります。
- 割れたハンドピースや本体を使用しない。コネクタを直接手で触らない。感電の恐れがあります。
- 照射の際には保護メガネを必ずかける。目に障害を与えないようにする。
- 子供に触らせない、使わせない。事故やトラブルの恐れがあります。
- 日焼けした肌、体調のすぐれない時や身体に異常を感じるときは照射を中止する。火傷の恐れがあります。
- 照射部位は重ならないようにする。火傷の恐れがあります。
- 本使用前に必ずパッチテストを行う。火傷の恐れがあります。
- ローション、オイル等を塗ったままの照射は避ける。火傷の恐れがあります。
- 専用のジェルやクリーム以外を肌に塗布した状態での照射は避ける。トラブルや故障の原因になる恐れがあります。
- 停電したときは、直ちに電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。事故の恐れがあります。



遵守

- お肌に異常が生じていないか、注意して使用してください。使用中に痛みや疲労を感じたときや、お肌に異常があらわれた時は、直ちに使用を中止する。お肌に合わない時は、ご使用をおやめください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。
- 成長過程の方は、保護者の管理下で安全に十分ご配慮の上でご利用いただき、異常が起きた際は、直ちにご使用を中止してください。成長期はホルモンバランスの関係上、お肌へのダメージが発生したり、ケアにおける効果が見られないことがあります。
- 普段から保湿などして、お肌が乾燥しないようにケアをしてください。お肌が乾燥していると、製品の効果が正しくあらわれない場合があります。
- 必ずシェーバーやカミソリでムダ毛を処理してからご使用ください。ムダ毛を除毛せずに照射すると、毛くずが焦げ火傷の原因となる恐れがあります。
- お肌に毛くずが残っている場合は、必ず取り除いてください。照射時に熱く感じる場合があります。
- 使用後は毎回、肌の保湿を行ってください。脱毛後は肌が荒れやすいため、しっかりと保湿を行う必要があります。
- ケアした日は入浴(シャワーは可)、運動、飲酒を控えてください。肌トラブルの原因となります。



禁止

- 専用のACアダプター以外は使用しない
・感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- たこ足配線をしない
・感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- ねじれたコードをそのまま収納しない
・ケーブルに負荷がかかり、断線・感電・ショートの原因となります。
- 子供の近くで使用しない
・強い光の為、目を傷める危険性があります。
- 照射部を直視しない
・目を傷める原因となります。
- 引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除菌剤・ライターなど)の近くで使用しない
・爆発・火災の原因となります。
- 本体や周辺機器に重い物を置いたり、使用中に落とさせたりなど、強い衝撃を与えない
・怪我・故障・ガラス割れなどの原因となります。
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない
・怪我・故障の原因となります。
- 分解や修理・改造はしない
・火災・感電・怪我の原因となります。修理は修理店に連絡してください。
- 異臭・異常発熱したときは使用を中止し、使用し続けるのをやめ、修理店に連絡してください。
・破損・発火の原因となります。お問い合わせ窓口にお問い合わせください。



禁止

- 通気口が作動しない時は使用しない
 - ・そのまま使用すると発煙・発火・故障・怪我の原因となります。お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- 次のような場所で機器の使用・保管をしない
 - ・浴室などの湿気の多い場所
 - ・ほこりの多い場所
 - ・直射日光の当たる場所
 - ・水などのかかる場所
 - ・傾斜、振動、衝撃がある場所
 - ・屋外
 - ・強い電波や磁気の発生する場所
 - ・油煙、湯気の当たる場所
 - ・発熱器具の近くなど高温になる場所
 - ・温度変化の激しい場所火災・感電・事故・故障・転倒の恐れがあります。
- 衣服や頭髮・物に照射をしない
 - ・焦げ・変色・破損の原因となります。
- ファンデーションなどのメイクアップ用品をつけた状態で照射をしない
 - ・必ずメイクを落としてから使用してください。火傷・肌トラブルの原因となります。
- 暗い部屋で使用しない
 - ・目を傷める原因となります。
- 通電したまま放置しない
 - ・火災・事故の恐れがあります。



遵守

- 指定部位以外や次のような部位には使用しない
 - ・粘膜(唇、乳輪、鼻孔、生殖器、肛門など)
 - ・傷
 - ・色素沈着
 - ・肝斑
 - ・老人性色素斑
 - ・雀卵斑(ソバカス)
 - ・色素細胞母斑(ホクロ、アザ)
 - ・白斑、色素欠乏症
 - ・血管奇形
 - ・静脈瘤
 - ・美容整形部位
 - ・刺青、タトゥー
 - ・完治していないニキビ
 - ・皮膚疾患
- 毛のはえる部分のみの施術。肛門はさけて施術くろやしみはさけて施術してください。1mm以上のほくろや隆起(出っ張った)したほくろしてください。施術が避けられない場合は、ガードシの部分の覆い隠して照射してください。
- ・頭部(おでこを含む)
- 皮膚が薄く、熱傷を起こす可能性があるため、刺青・タトゥーの照射は必ず避けて下さい。
- ※極度の日焼け直後の方(赤みがある・熱を帯びてめくれている方)は、禁忌事項です。
- ※刺青・タトゥー・日焼け部分に照射した場合、当いかねますので、自己責任となることをご了承ください。



遵守

- 必ず交流100～240Vで使用する。ACアダプターは根元まで確実に差し込む
 - ・火災・感電・事故の原因となります。
- 長期間使用しない時はACアダプターをコンセントから抜く
 - ・火災の恐れがあります。
- 使用後は必ず電源をオフにしACアダプターをコンセントから抜く
 - ・火災・事故の恐れがあります。
- 機器(本体等)に水・異物等が入った場合は、直ちに使用を中止し、点検を依頼する
 - ・火災・感電の恐れがあります。
- 地震や雷を感じたら電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く
 - ・火災・感電の恐れがあります。
- 機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する
 - ・火災・感電の恐れがあります。お問い合わせ窓口にご連絡ください。
- 照射口が汚れていないか定期的に確認・掃除する
 - ・火傷・故障の原因となります。
- 照射レベルを急激に上げ過ぎない
 - ・火傷の原因となります。



遵守

- 海外で使用する際も必ず交流100～240Vで使用する(無料修理は日本国内のみ)
 - ・火災・感電の原因となります。
- 必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること
 - ・発熱・発火・故障の原因となります。
 - ・地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なります。
 - ・プラグ変換アダプターについては、販売店にご確認ください。

使用目的

- ・本製品の使用は医師やエステシャン、または同等の資格を有する者による使用とし、医療機関やビューティーサロン等、屋内での使用に限定します。
- ・また、本製品は医療器具ではありませんので、治療行為としてご使用を行わないように十分お気を付けください。また、取扱説明書に準ずる使用方法以外では使用しないでください。

設置時

- ・本製品は、限定された者のみが取り扱うように、使用・設置してください。
- ・本製品は、ドアによる出入り等、完全に締め切ることができる部屋に設置してください。
- ・本機器は室温が5～30℃で、室温は50%以上70%以下の室内に設置してください。真冬にエアコン等で加温していくと、急激に湿度が下がります。加湿をしながらの加温をお勧め致します。
- ・温度や湿度が高くない場所、直射日光が当たらない場所に設置してください。
- ・施術エリア内に鏡などの反射物を設置する場合、照射によって反射する光が反れ、危険を伴う恐れがありますので、反射物の位置は特にご注意ください。
- ・ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。
- ・電源は、専門の電気工事者が指導・設置してください。
- ・電源コードについているアースが正しく接続できる場所に設置してください。
- ・本製品やハンドピースなどの付属品が幼児や子供の手に触れないようにしてください。
- ・ゴミやほこりの多い場所、油煙や湯気があたるような場所やエアコンの下など、水滴が落ちる場合のある場所に設置しないでください。

使用时

本製品は精密な部品を使用した電子機器ですので、衝撃や無理のあるご使用はお避け下さい。

- ・電源コードは、必ず付属品をお使いください。
- ・付属品の電源コードは、本製品以外の電子機器に使用しないでください。

- ・本製品に水をこぼしたり、濡らしたりしないでください。火災・感電の恐れがあります。電源プラグやハンドピースのコードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。
- ・芯線の露出、断線するようなことはお避けください。
- ・たこ足配線はしないでください。
- ・電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- ・液晶パネルには、絶対に衝撃を加えない。衝撃を加えると、パネルの破損の原因となります。
- ・本製品及びハンドピースに強い衝撃を加えたり、ハンドピースを落とさないでください。
- ・濡れた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。ショート・感電の恐れがあります。また、故障の原因になります。
- ・コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしないでください。
- ・本製品の裏・前面・カバーは外さない、本製品を改造しない。所定の人は分解・修理をしないでください。改造や分解に起因する故障の原因となります。

保護メガネの着用

本製品の操作にかかわる方と被施術者は必ず保護メガネを着用してください。そのすべての人は付属品の保護メガネを着用してください。保護メガネを着用したままから退出してください。ハンドピースの照射口を直接覗くことは絶対にしないでください。

その他

本製品の本体及びハンドピースに不具合が生じたままのご使用は絶対にしないでください。その際はすぐに使用を中止し、販売店までご連絡ください。本体及びハンドピースに異常が発生したときは、直ちに使用を中止し、電源を切ったうえで電源を依頼してください。そのまま使用すると、故障の恐れがあります。操作中に漏液した場合は使用を中止してください。本体やハンドピースの付近に工具を近づけないでください。変形や内部機器の故障の原因になります。本体やハンドピースに水がかからないようにしてください。内部故障の原因となります。本体及びハンドピースに強い衝撃を加えたり、ハンドピースを落としたりしないでください。

Before use

ご使用前に

本体サイズ	縦:47cm横:37cm高さ:40cm
対応メニュー	SHR、IPL、KPL、E-light、RF
タッチパネル	10.4インチ(感圧式)
用途	脱毛、フェイシャル、脂肪溶解
ハンドピース	プロ(A:SHR+KPL B:IPL+E-light+RF) セルフ(A:SHR B:IPL)
フィルター	430nm,530nm,590nm,640nm,690nm
最大消費電力	2000W
電圧	110V
連続稼働時間	14時間
光源	キセノンランプ
照射面	クリスタルサファイヤ
動作使用状況	周囲温度:0℃~40℃ 相対湿度:20%~80%
重量	48kg
給水最大量	4L(4kg)

■梱包の確認

本製品が届きましたら下記をご確認ください。

- 1.箱の個数
- 2.梱包の損傷(機械を害するほどの損傷の有無)
- 3.付属品の確認

- 脱毛機本体
- ハンドピースA
- ハンドピースB
- 注水チューブ
- 電源コード
- 施術者用保護メガネ(ケース付き)
- お客様用保護メガネ(ケース付き)
- フットペダル
- フィルター(430nm,530nm,590nm,640nm,690nm)
- ネジ×8
- ハンドピースポケット×2

- 4.付属品の損傷(機器を害するほどの損傷の有無)
※開梱時や運搬時は持ち手部分を使って持ち上げてください。

※修理を依頼される場合はケースに機器を戻すの上、配送していただきますので、ケースは保護してください。
※本製品を横倒しにしないでください。

⚠ 注意


当社では、梱包にあたって良品質のものを使用しておりますが、万が一、運搬時による損傷(破損、変形、変色、内部損傷など)が発生した場合は、製品到着後2週間以内にご連絡ください。製品到着後2週間以内は運搬時の補償の対象となりませんのでご注意ください。損傷などを発見した場合は、写真を撮っていただき、ご連絡ください。

Before use

ご使用の前に

痛みの強さと照射可能部位

部位	特徴	痛み
顔 (男性)	毛が太く毛根も深い	痛みを感じ安く効果にも時間がかかる
顔 (女性)	毛根は浅い	それほど痛みを感じない
背中	皮膚が厚い	それほど痛みを感じない
ワキ	毛が太く毛根も深い	痛みを感じやすい
胸 (男性)	毛が太く毛根が深い	痛みを感じやすい
胸 (女性)	毛根は浅い	それほど痛みを感じない
腕	毛根は浅い	それほど痛みを感じない
おなか	毛根は浅い	それほど痛みを感じない
VIO	毛が太く毛根が深い	痛みを感じやすい
太もも	脂肪の量が多く毛根は深い	それほど痛みを感じない
ひざ下	毛が太く毛根は浅い	痛みを感じやすい

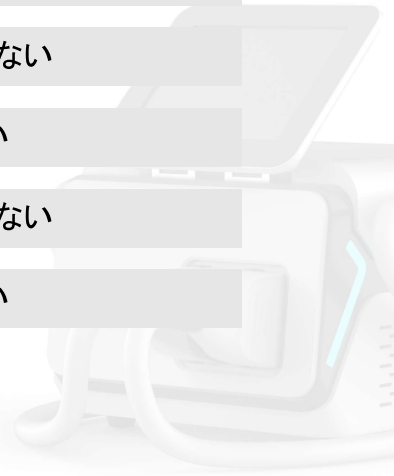

Before use

ご使用前に

脱毛前に必ず行ってください

■カミソリまたはシェーバーで余分な体毛を処理してください

光は、メラニンに反応します。効率よく照射するためには、深剃り等を行わず、使用する前日に毛並みに沿って処理を行ってください。軽く、優しく剃ることがポイントとなります。

■照射部位を洗浄してください

使用前に照射する部位を洗浄し、清潔にしてください。

■肌の確認

本製品をご使用前に、照射する部位の肌に異常がないことをご確認ください。
(傷口、湿疹、ほくろ、刺青、シミ等のある部位には使用しないでください)

肌への照射テスト

はじめての使用時には照射レベルを弱めて、腕や手の甲に試験照射をおこない火傷やただれ、水泡、その他の反応症状が照射部位および、その周辺に生じてないか確認してください。
照射後に、保湿液を肌に塗布してアフターケアを行うようにしてください。

照射レベルの調整

肌へのテストを行った後、照射レベルの調節を行って
※基本的に10Jからスタートし、肌の様子を確認しながら



ハンドピースの正しい肌への当て方

ハンドピースを直角にして肌に押し当てます。照射面が
間が出来ないように十分注意をします。



Before use

ご使用前に

各部の名前

■ハンドピース



ハンドルA

プロモード : SHR・KPL
セルフモード : SHR



ハンドルB

プロモード : IPL・E-light・RF
セルフモード : IPL

■保護メガネ(顧客用)



■保護メガネ(セラピスト用)



■フィルター



フィルター(標準5枚)

【フィルター標準 5枚】

- 430nm: ニキビの改善
- 530nm: シワ、赤ら顔、エイジングケア、バスタアップ
- 590nm: シワ、赤ら顔、エイジングケア、シミ改善
- 640nm: 脱毛 色の濃い人 日本人向け
- 690nm: 脱毛 色白の人

【オプション】

- 480nm波長: バスタアップ
- 750nm波長: 脱毛 細かい毛

■フットペダル



■電源コード




設置する際のお願い

■設置してはいけない場所

- ・不安定な場所や高い場所
(落下や転倒による、けがや家財の破損、感電、ショートによる火災、事故の原因)
- ・浴室など、高温、多湿、水のかかる場所
(漏電による、感電や火災の原因)
- ・キッチンなど、油分が浮遊する場所
(ひび割れによるけがの原因)
- ・油や可燃性ガスなどを使用したり、漏れるおそれのある場所
(引火や本体への吸引による、発火や発煙の原因)
- ・動植物に、直接風が当たる場所
(風による乾燥の原因)
- ・通気口の風が家具や壁に直接当たる場所
(シミの原因)

- 通気口をふさいだり放熱を妨げないでください。
- 本機の周囲は10cm以上の間隔をあけて設置してください。

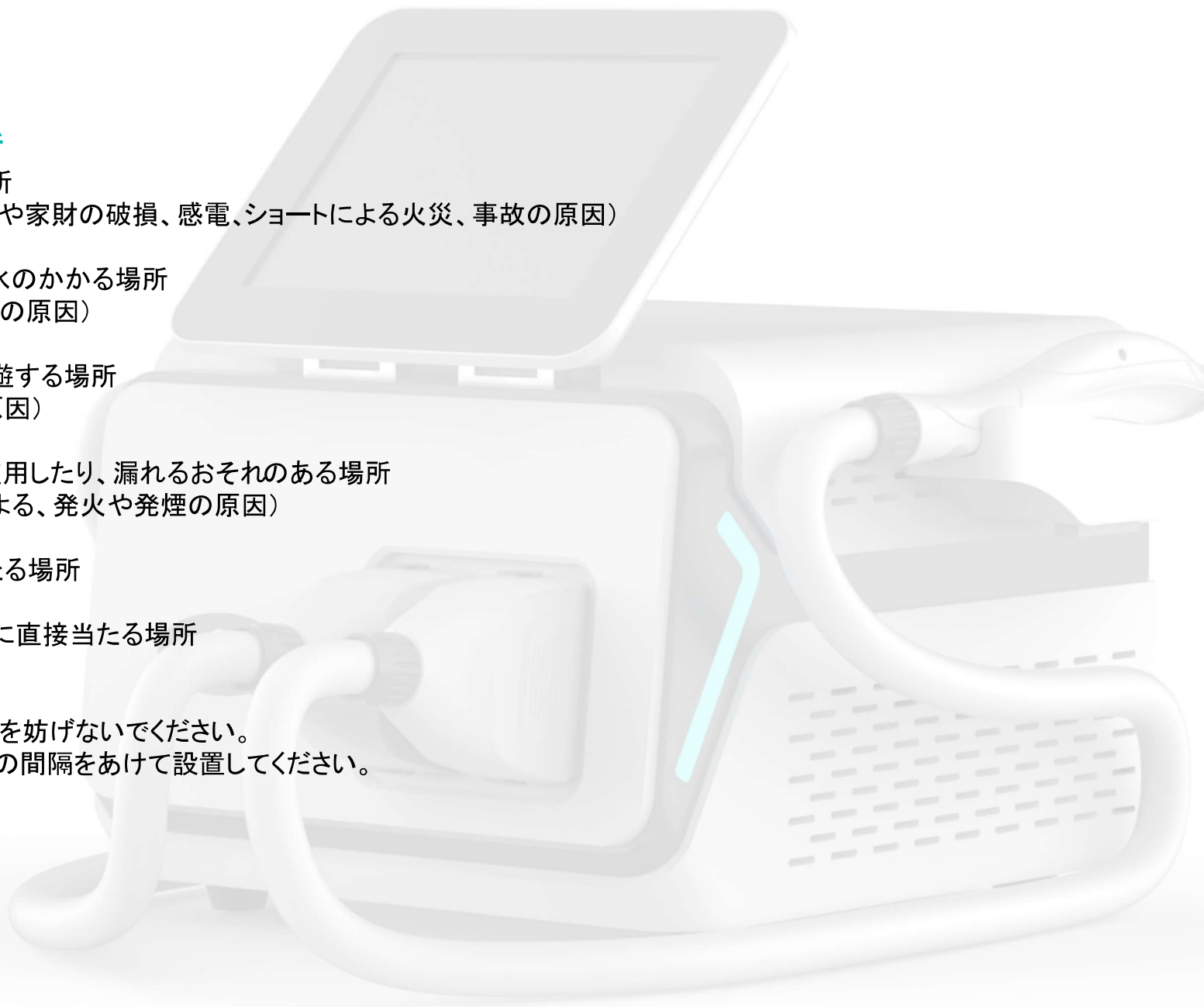

■ハンドピースの接続

ハンドピースプラグをソケットに差し込んでください。ハンドピースAとBがございます。

それぞれ対応した箇所に奥まで差し込んでください。

※無理に差し込まないでください

※接続したらハンドピースを軽くゆすり動かないことを確認してください。



■電源コードの接続

電源コードを電源ソケットに差し込みます。

※差し込む向きを確認して差し込んでください。

※無理に差し込まないでください。




■電源コードの接続

1、フットペダルプラグをフットペダルソケットに差し込みます。

※フットペダルプラグの先端下部に窪みがあります。差し込む向きを確認して差し込みます。

2、フットペダルプラグについているリングを時計回りに回し、固定します。

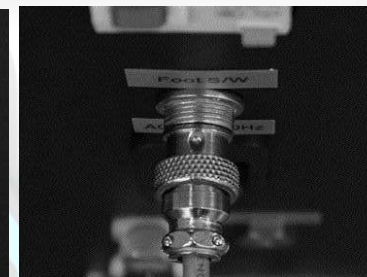


QRコードをスキャンして取り扱い動画を確認してください。動画を見ながら準備できていただくことが可能です。

■本体への給水方法

(1)給水プラグを給水口に差し込みます。カチッと音がするまで奥に差し込んでください。




(2)本体裏面のベントの栓を外します。

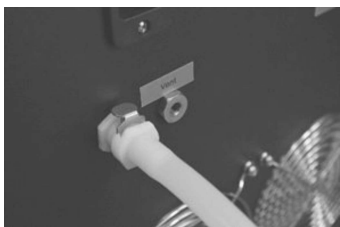

(3)漏斗部分を使用して精製水をいれてください。水が満タンになるとベントから精製水が溢れでてきます。(最大3L入ります)



(4)本体裏面のベントの栓を緩めます。

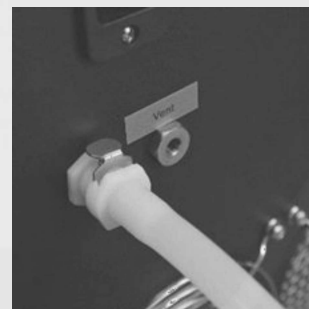

(5)注水チューブを外してベント



(注水チューブを外した際、少量の水が漏れますが、故障ではありません)

■本体内の排水方法

- (1)注水チューブを差し込みます。水が出てきますので、漏斗部分を上に向けてください。
- (2)本体裏面のベントの栓を外します。注水チューブから水が出てきます。
- (3)最後にベントの栓を締め、注水チューブを外して終了です。

給水方法



排水方法



■ブレーカーの準備

本体裏面のブレーカーをあげてください。

ブレーカー切れた状態



ブレーカーの入った状態



■電源を点ける

本体表面の電源ボタンを教えてください。ボタン部分が点灯しモニターが表示されます。




モニター操作 サロンモード

サロンモードはセラピストが利用するコースとなります。またメニューは種類選択することが可能。連射式のSHR、濃い毛を
発揮するIPL、高速連射式KPL、光フェイシャルとして大人気のE-light、そして脂肪溶解コースとしてご利用いただけるF。
が必要に応じてパワーの調整をしながら施術をしてください。

■モニター操作

操作画面のサロンモードを選択してください。

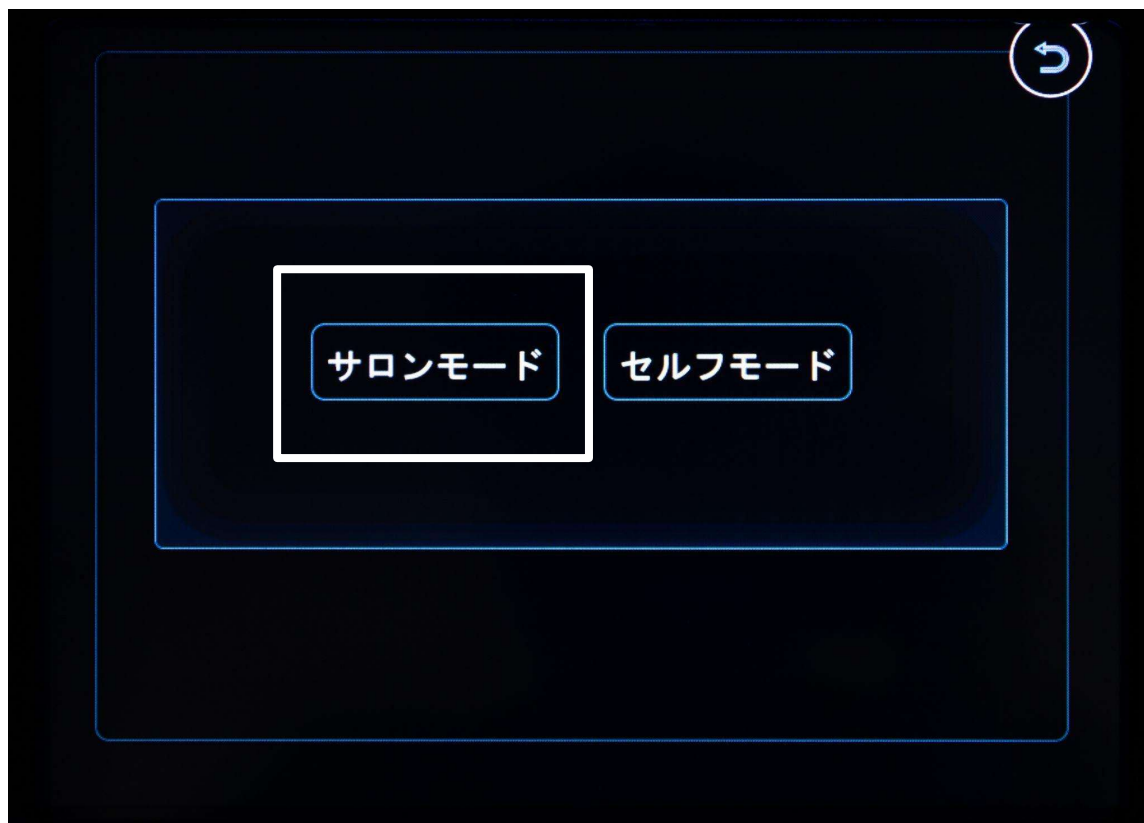

施術コースを選択してください。



パルス幅

皮膚に作用する時間。大きいほど皮膚に作用する時間が長くなり、エネルギーが蓄積されやすくなる原因で、やけどのリスクがあります。

サロン様で調整することはできません

照射数

上:トータルカウント(本体合計照射回数)
下:カウント(照射回数)

管理画面

上:水の温度
中:水の循環
下:コンデンサー電圧



周波数 (Hz)

周波数は1Hz~10Hz調節可能。

照射パワーの設定

設定可能範囲: 10~50 (J/cm²)

冷却ボタン

ONのところを選択すると冷却機がONになります。OFFのところを選択すると冷却機がOFFになります。
+か-を押すと冷却温度を変えられます。
設定可能範囲: 1~5(段階)※

スタートボタン

ハンドピースの照射ボタンを押すと光が賞さ Yされるようになります。

保存ボタン

パワーの設定をした後に押すとデータが保存され、再度起動した際に保存したデータで動作します。

戻るボタン

一つ前の画面に戻ります。



照射数

上:トータルカウント(本体合計照射回数)
下:カウント(今回照射回数)

管理画面

上:水の温度
中:水の循環
下:コンデンサー電圧



パルス幅 サロンで触ることはで
皮膚に作用する時間。大きい
する時間が長くなり、エネルギ
やすくなる原因で、やけどのり
調節は不可。

照射間隔時間: 1s~5s

照射パワーの設定

設定可能範囲: 10~50(J/cm²)

冷却ボタン

ONのところを選択すると冷却機能
OFFのところを選択すると冷却機
す。
+か-を押すと冷却温度を変えるこ
設定可能範囲: 1~5(段階)※最

スタートボタン

ハンドピースの照射ボタンを押すと光が賞さ Yされるようになります。

保存ボタン

パワーの設定をした後に押すとデータが保存され、再度起動した際に保存した
事が出来ます。

戻るボタン

一つ前の画面に戻ります。



パルス幅 サロン様は触ることはできません。

皮膚に作用する時間。大きいほど皮膚に作用する時間が長くなり、エネルギーが蓄積されやすくなる原因で、やけどのリスクがあって、勝手に調節しないでください。

照射間隔時間


設定可能範囲: 1s~5s

照射数

上:トータルカウント(本体合計照射回数)
下:カウント(照射回数)

管理画面

上:水の温度
中:水の循環
下:コンデンサー電圧

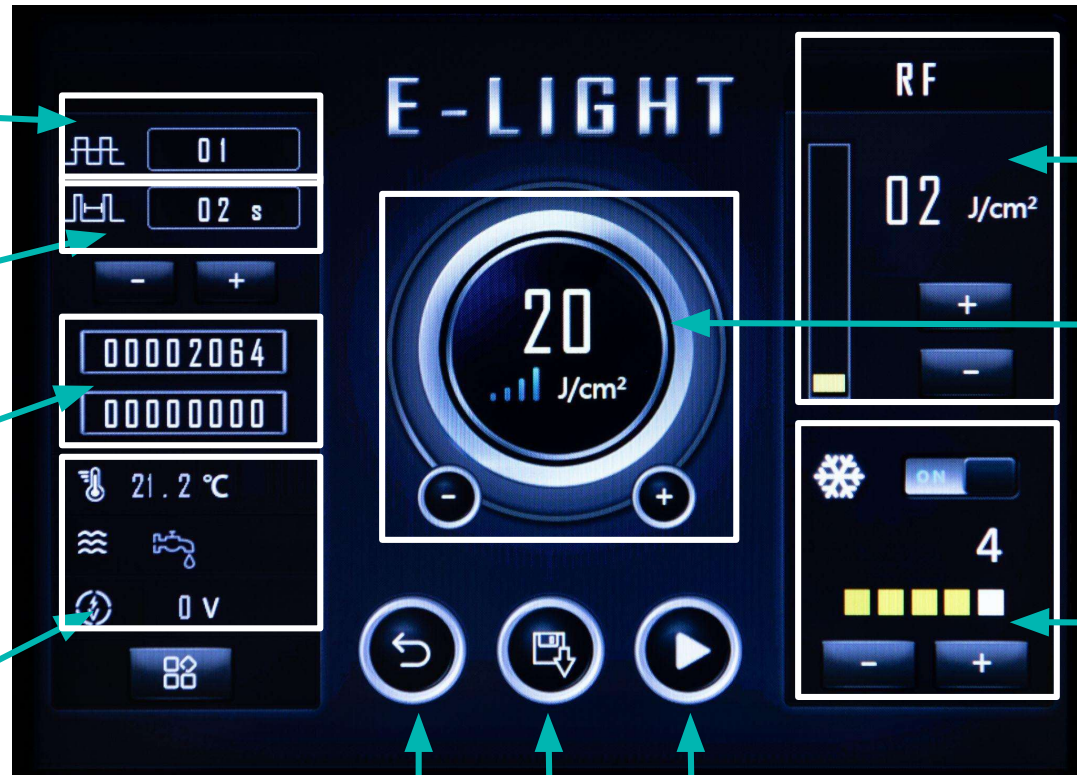

RFのパワー設定

E-lightとは、IPLとRFを同時に照射します。中央の出力設定の他にRFのパワーを設定できます。
設定可能範囲: 01~50(J/cm²)

照射パワーの設定

設定可能範囲: 01~50(J/cm²)

冷却ボタン

ONのところを選択すると冷却機能がONになります。OFFのところを選択すると冷却機能がOFFになります。
+か-を押すと冷却温度を変えます。
設定可能範囲: 1~5(段階)※

スタートボタン

ハンドピースの照射ボタンを押すと光が照射されるようになります。

保存ボタン

パワーの設定をした後に押すとデータが保存され、再度起動した際に保存したデータで動作が出来ます。

戻るボタン

一つ前の画面に戻ります。




照射数

上:トータルカウント(本体合計照射回数)
下:カウント(照射回数)

管理画面

上:水の温度
中:水の循環
下:コンデンサー電圧

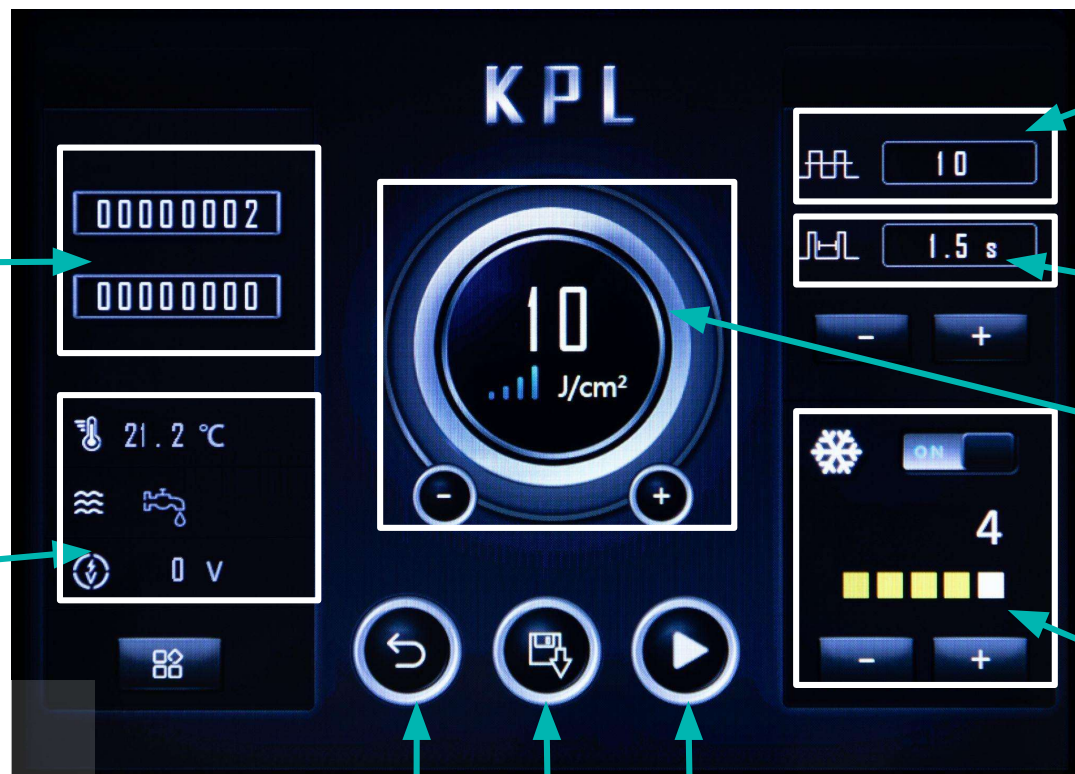

連射数: 10~30

連射数は一秒間でハンドピースショット総回数です。連射数は

照射間隔時間: 1.0s~9.0s

照射パワーの設定

設定可能範囲: 01~50 (J/cm²)

冷却ボタン

ONのところを選択すると冷却します。OFFのところを選択するとOFFになります。
+か-を押すと冷却温度を変えます。設定可能範囲: 1~5 (段階)

スタートボタン

ハンドピースの照射ボタンを押すと光が賞さ Yされるようになります。

保存ボタン

パワーの設定をした後に押すとデータが保存され、再度起動した際に保存したデータが読み込まれます。

戻るボタン

一つ前の画面に戻ります。



パルス幅 サロン様は触ることはできません。


皮膚に作用する時間。大きいほど皮膚に作用する時間が長くなり、エネルギーが蓄積されやすくなる原因でやけどのリスクがあります。

照射時間の間隔

設定可能範囲：500s～5000SS

管理画面

上：水の温度
中：水の循環
下：コンデンサー電圧

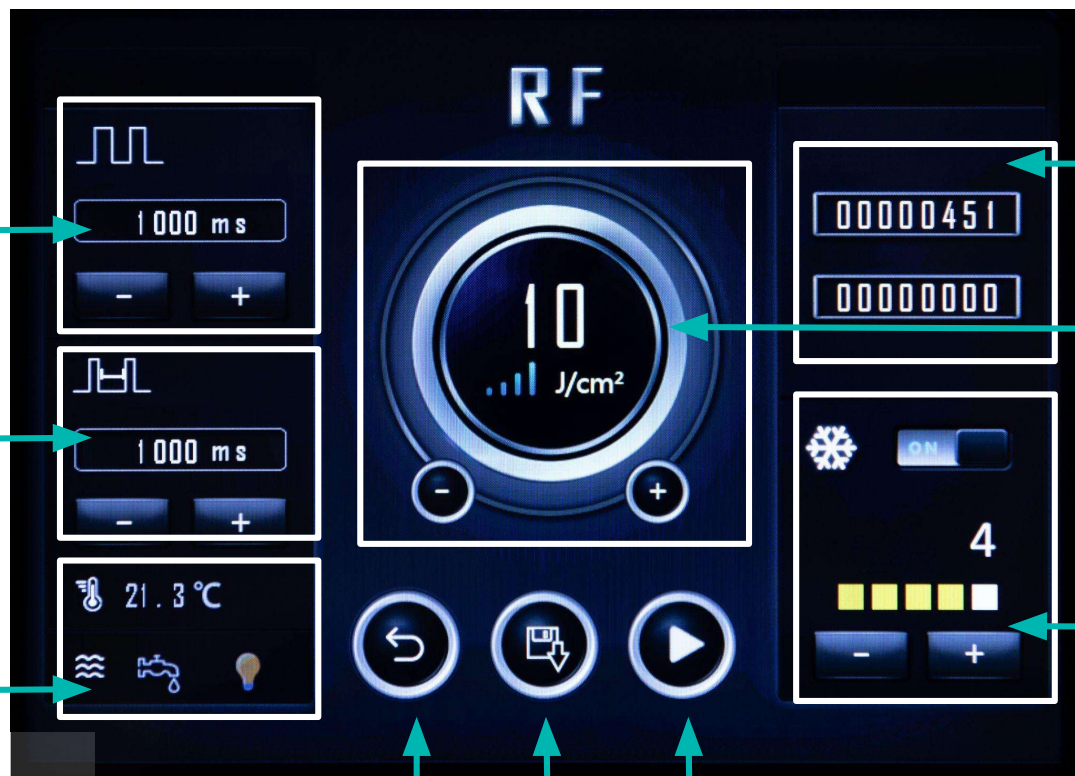

照射数

上：トータルカウント(本体合計)
下：カウント(照射回数)

照射パワーの設定

設定可能範囲：10～50(J/cm²)

冷却ボタン

ONのところを選択すると冷却機が稼働します。OFFのところを選択すると冷却機が停止します。
+か-を押すと冷却温度を変えます。
設定可能範囲：1～5(段階)※

スタートボタン

ハンドピースの照射ボタンを押すと光が賞さ Yされるようになります。

保存ボタン

パワーの設定をした後に押すとデータが保存され、再度起動した際に保存したデータで動作します。

戻るボタン

一つ前の画面に戻ります。




モニター操作 セルフモード

セルフモードはお客様がご自身で施術をするコースになり、使えるメニューは産毛に効果を発揮する連射式SHR、そして濃い毛に効果を発揮する単発式のPLの2コースをご利用いただくことができます。ElightやRFはお怪我のリスクから弊社の機械にはセルフモードに搭載はしていません。

■モニター操作

操作画面のセルフモードを選択してください。

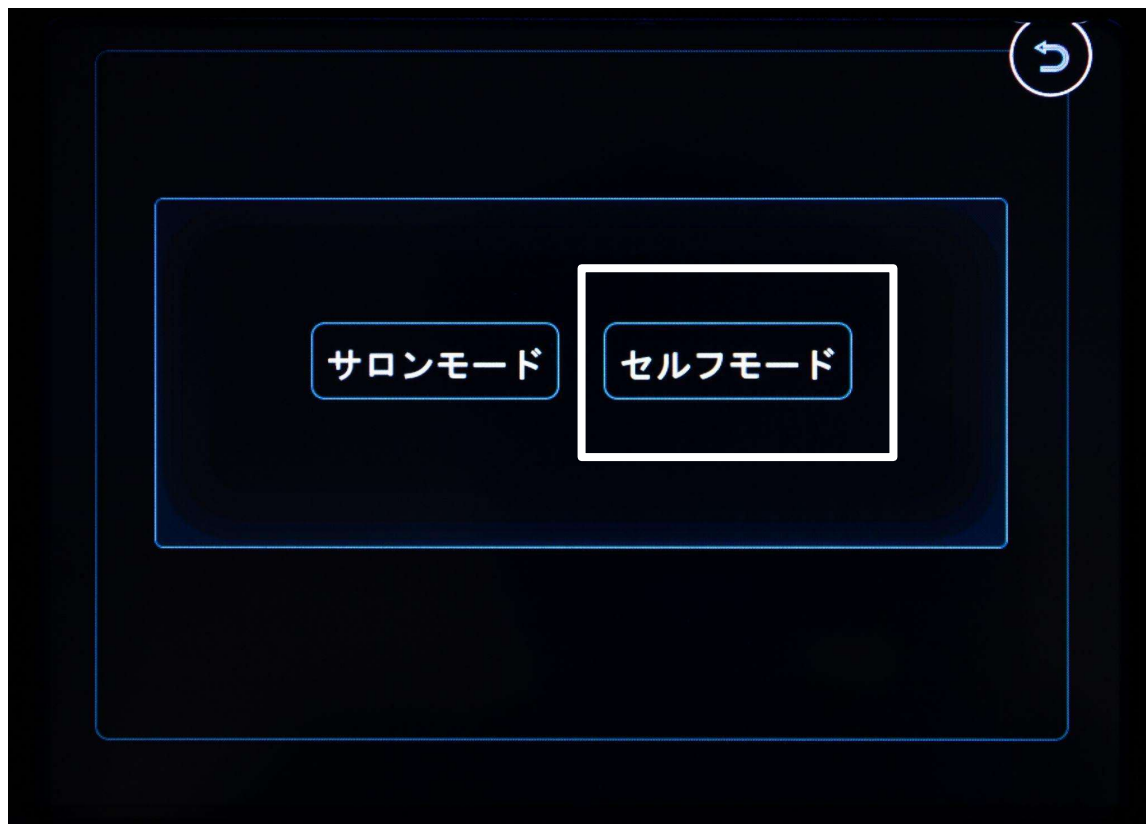


施術コースを選択してください。



照射エネルギーの設定

01J/cm²~50J/cm²

※注意:照射エネルギーのレベルを急激に上げ過ぎないでください

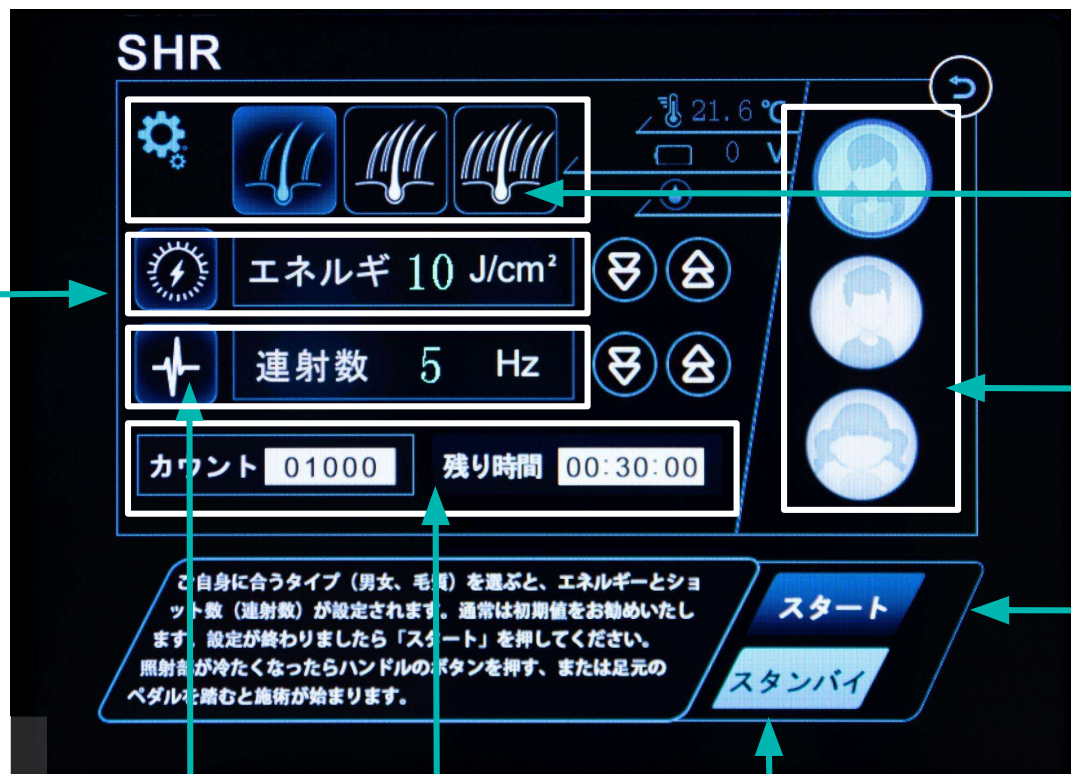

毛の濃さの設定

お客様の毛の状態を選択して

年齢性別の選択

お客様の性別や大人、お子様います。

スタートボタン

ハンドピースの照射ボタンを押すようになります。

スタンバイボタン

管理設定

お客様のご利用を制限するショット数や残り時間を入力します。


連射数のアイコン



照射エネルギーの設定

01J/cm²~50J/cm²

※注意:照射エネルギーのレベルを急激に上げ過ぎないでください

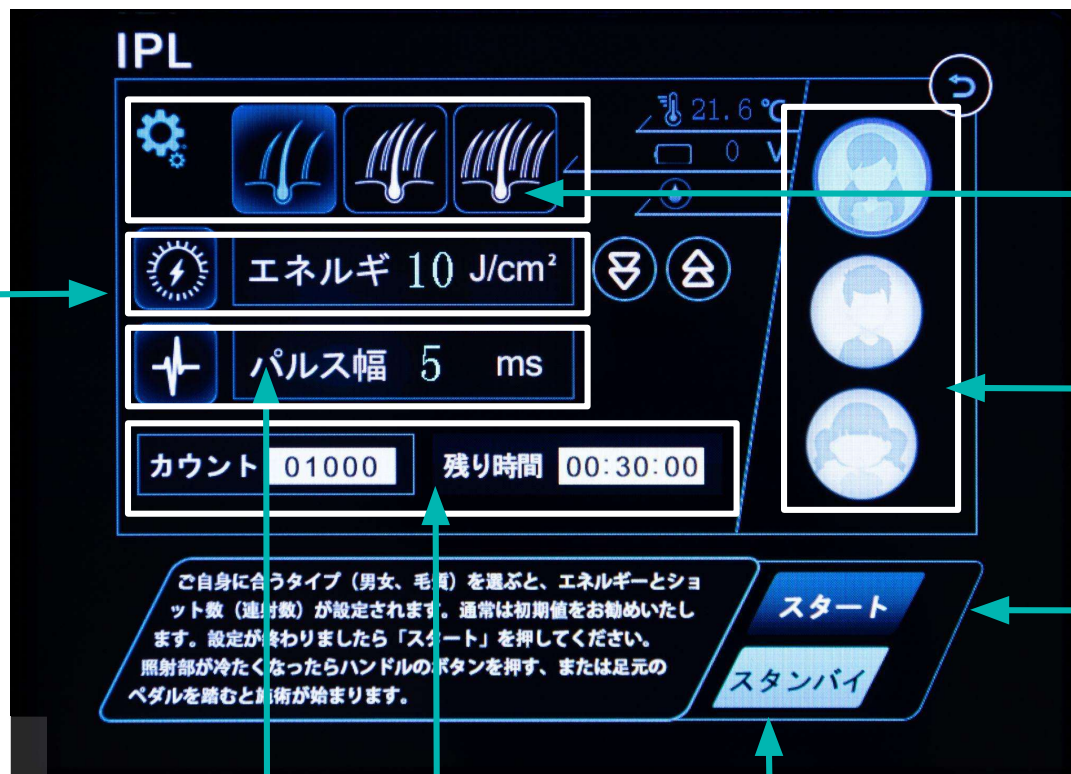

毛の濃さの設定

お客様の毛の状態を選択して

年齢性別の選択

お客様の性別や大人、お子様です。

スタートボタン

ハンドピースの照射ボタンを押すようになります。

スタンバイボタン

管理設定

お客様のご利用を制限するショット数や残り時間を入力します。

パルス幅

皮膚に作用する時間。大きいほど皮膚に作用する時間が長くなり、エネルギーが蓄積されやすくなる。




モニター操作 終了方法



■モニター操作

1、冷却部分がOFFになっていることを確認する。

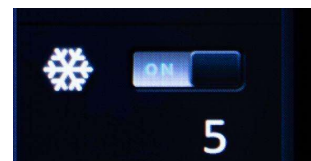

2、画面下の戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。



3、画面右上の戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。



4、本体表面の電源スイッチを教えてください。
モニターがブラックアウトし電源が切れます。



■拭き掃除

ハンドピースは拭いてからハンドピース
ください。拭く際は電源を切り、濡れてい
ください。

また、洗剤やアルコール等は使用しない

■収納について

本体を収納する際は、

- ・モニタを倒してから収納してください。
- ・ハンドピースポケットはプラスドライバー
(ネジは無くさないようお気を付けてくださ
- ・最初に入っていた黒い箱に収納した後
閉めてください。
- ・保管時は横に倒さないでください。
(衝撃による故障の原因)

warranty

保証書

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございました。

本保証書は、次項記載内容で無料修理を行う事をお約束するものです。(事項をご覧ください。)

お買い上げ日から1年以内に、故障が発生した場合、本保証書をご提示の上、販売店にご持参ください。

お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合は無効となりますので、必ず記入欄をご確認ください。

本保証書は再発行致しませんので、紛失されないよう大切に保管下さい。

品番	
製造番号	
保証開始日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より1年間
販売店	

guarantee

保証について

(1) 保証期間は1年です。

(2) 保証期間中に取扱説明書、本製品添付の注意書きに従った正常な状態で本製品が故障した場合に、当社は本規定に従います。製品に保証書を添えてご持参ください。

修理をご依頼される場合は、必ず本保証書を本製品にご添付ください。本保証書の再発行は致しませんので大切に保管ください。

(3) 本製品の修理を希望される場合、保証書の表面記載の修理受付窓口までご連絡ください。

修理受付窓口にて故障内容やご使用状況を伺いながら故障個所の特定を行います。原因によっては、当社指定業者がお客様から故障した本製品を引き取り、当社にて修理完了後、ご指定の場所までお届けします。(持ち込みでの修理希望をされる場合は、お買い上げの販売店へご持参ください。)

なお、一部製品について、当社判断により、修理ではなく、故障品と機能、性能が同等な製品(再利用品を含む)との交換対応です。

(4) 液晶パネルにおいて、画面の一部に点灯しないドットや常時点灯するドットが存在する場合がありますが、液晶パネルの象でありますので、修理対象となりません。

(5) 保証期間中でも、次のような場合は有料修理となります。

- ・本保証書が本製品に添付されていない場合

- ・本保証書に必要事項の記入がない場合、また字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合

- ・ご使用上の誤り(水などの液体こぼれ、水没、落下等)または、改造、解体、誤接続、誤挿入による故障、損傷の場合

- ・火災、震災、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧や指定外の電源の使用による故障

- ・損傷の場合

- ・当社指定業者外の第三者による作業などに起因する不具合

- ・本製品または周辺機器の経年変化、または自然環境、住環境などに起因する結露、腐食、その他の不具合・お客様自身で改造(必要部品の取り外しを含む)に起因する不具合

(6) ハンドピースの保証照射数はAが50万回以内、Bが15万回になります。それ以上照射された場合、ランプ交換は有料となります。

(7) 本保証書は国内のみ有効となります。

(8) 当社では、修理期間中の代替機の貸し出しに関する内容は弊社HPの「製品保証について」を参照するものとします。

なお、弊社HP「製品保証について」と保証内容が異なる場合、HPIに記載されている内容が優先されるものとします。

(9) 修理の為に取り外した故障部品は、再利用に努めているため、お客様にお渡しすることはできません。

(10) 本製品が収納されていたケースが無い場合、修理を受け付けることはできません。

(11) 出張での修理は受け付けておりません。

(12) 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

A 3D rendering of a white medical device, possibly a laser or ultrasound machine. It features a large, tilted screen at the top, a control panel with a prominent cyan-colored button on the side, and several thick white cables connected to the front. The device is shown from a three-quarter perspective against a plain white background.

Thank you